



Produktkatalog Standardsortement varmehjelpe midler


Høyest varmeeffekt over lang tid

Forbehold:

Alle verdier som varmoeffekt, vekt, størrelser, brukstid etc. er veiledende og kan naturlig variere i noen grad fra produkt til produkt. Bruksområder, tips og anbefalinger er gitt som en indikasjon på forventet oppfattelse av produktet under normale forhold. Råd om medisinske produkter for spesifikke helsetilstander eller lidelser bør alltid gjøres i samarbeid med kvalifisert medisinsk personell. Katalogen utgis med forbehold om skrivefeil og andre feilaktige og ikke-tilsiktede feil. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer ut fra det som er oppgitt i katalogen, som følge av sikkerhetskrav eller andre nødvendige justeringer som råd fra helsepersonell-, myndigheter- eller andre organer som har rett til å pålegge slikt, eller dersom slike justeringer på ander måter skulle bli nødvendig.

Bilder oppgitt i katalogen kan variere noe fra endelig produkt (f. eks gjengivelse av farge, som tekstur osv.).
908.1000.101D

Versjon 2023.01.21

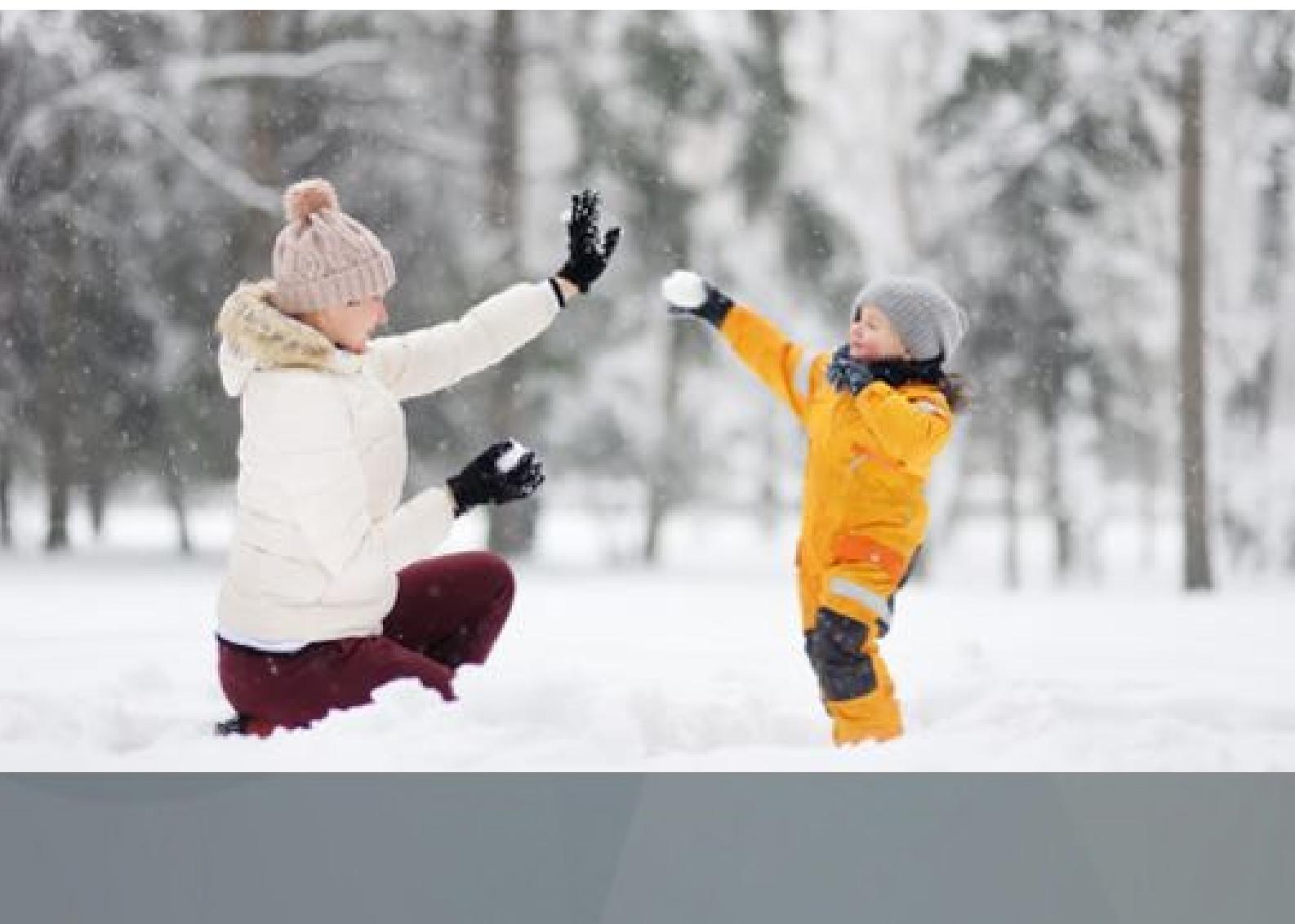

Innhold

	Side
Hva er varmehjelpe midler?	4
Hvilke egenskaper anses som viktig for varmehjelpe midler?	4
Hva er anbefalt varmeeffekt?	5
Voksen	
Cypromed Pointer Mitt	6
Cypromed Moon Light Mitt	7
Cypromed Heli Ski Leather Mitt	8
Cypromed Goretex Perform 5-finger	9
Cypromed Cresta 5-finger	10
Cypromed Matthew	11
Cypromed Swisswool Classic 5-finger	12
Cypromed Emma	13
Cypromed Touch Point Active	14
Cypromed Power Stretch Contact	15
Cypromed Allround Winter	16
Cypromed Joystick Moon Light Mitt	17
Cypromed Ulvang Spesial	20
Cypromed Tric 600	21
Cypromed Inter Ski MWplus	22
Cypromed Sole	23
Cypromed Termo Cush	24
Barn / Jr.	
Cypromed Baby Zip Mitt	26
Cypromed Sarri Zip Mitt	27
Cypromed Sarri Zip 5-finger	28
Cypromed Varre Kids	29
Cypromed Spesial Kids	30
Cypromed Active Knee Jr.	31
Tilbehør/reservedeler	32
Informasjon	
Bestillingskjema	34
Måleskjema	35
Spesialtilpasninger	36

Viktig informasjon om varmehjelpemidler

Hva er varmehjelpemidler?

Varmehjelpemidler er kort fortalt en hanske, sokk, sko eller annet produkt som har et innebygd varmeelement. Varme-elementet i produktet mottar elektrisk energi fra et batteri eller annen energikilde som omdannes til varme. Denne tilleggsvarmen kan hjelpe deg med å holde deg varm dersom du er kuldesensitiv, har manglende evne til selv å generere varme, eller rett og slett bare fryser mye i kaldt vær.

Varmen som tilføres i varmehjelpemiddelet måles ofte i nominell effekt. Varmeffekt måles i enheten Watt, på samme måte som en panelovn eller annen varmekilde i hjemmet. Nominell effekt er den varmeeffekten eller energien som produktet i gjennomsnitt vil gi deg under hele bruksperioden. Hos oss vil et voksenprodukt leveres med godt over 7 watt nominell varmeeffekt, mens et barneprodukt typisk vil leveres med 2-5 watt varmeeffekt. Varmeffekten hjelpe middelet leveres med vil variere med størrelsen på produktet slik at den er i skala i forhold til det som skal varmes opp inne i produktet. Vårt mål er at du alltid er varm og at batteriet varer lengst mulig.

Produktet leveres også med en batteripakke. Denne batteripakken vil inneholde en begrenset mengde energi. Batterikapasitet oppgis i watt-timer. Når du bruker batteripakken vil den etter hvert gå tom. Når batteriet er oppbrukt lader du det bare opp før neste gangs bruk. Desto større batteripakke eller høyere antall watt-timer produktet ditt har, desto lengre vil man forvente at brukstiden vil være. Hos oss vil et voksenprodukt leveres med et 18.9 watt-timer batteri, mens et barneprodukt vil leveres med 8.14 watt-timers batteri.

Hvile egenskaper anses som viktig for varmehjelpemidler?

-  Tilstrekkelig varmeeffekt er varmehjelpemiddelets viktigste egenskap! Varmehjelpemiddelet er en kontinuerlig kamp mot elementene utenfor produktet! Våre produkter kan levere over 11W varmeeffekt i de tilfeller hvor det er nødvendig.
-  Batterier med høy kapasitet fra en anerkjent batteriprodusent. Når varmehjelpemiddelet leverer høy effekt er det nødvendig at batteriene greier å holde følge. Vårt største batteri vil kunne levere en varmeeffekt på 11W i over 1.5 time! Dette sørger for at du ikke bare er varm, men at du også holder deg varm i lang tid.
-  Godkjening i henhold til medisinsk direktiv. Dette sikrer at produktet skal være trygt å bruke og at det er tilpasset brukere med medisinske behov.

Hvor mye varmeeffekt trenger jeg?

Hva er anbefalt varmeeffekt?

Hvor mye varmeeffekt du trenger vil avhenge av mange faktorer. Generelt sett vil en overflatetemperatur på hud over 20°C oppfattes som greit av de fleste. Vi anbefaler minst 7W i et voksenprodukt. Det finnes i dag mange leverandører av varmeprodukter på markedet. Mange av disse produktene holder en meget lav varmeeffekt, og gir etter vår erfaring ikke tilstrekkelig varme for personer som har et medisinsk behov.

Opplevelsen av varme i produktet vil videre påvirkes av en rekke faktorer:

- Helsetilstand og egenproduksjon av varme
- Isolasjon og materiale i produktet
- Utetemperatur
- Om produktet er vått eller tørt og hvor slitt det er
- Vind og luftfuktighet
- Plassering- og mønster av varmetråd i produktet
- Størrelsen på produktet (hånd- / fot-størrelse)
- Din toleranse av hva som er en behagelig temperatur
- Varmeffekten i produktet
- Hvor kald du er når produktet settes på (utgangspunkt)

Vårt beste råd til deg er at du velger et varmehjelpemiddel som har god nok varmeeffekt til å oppfylle dine behov, og at du er klar over at det kan være store forskjeller fra produsent til produsent. Undersøk alltid hvilken varmeeffekt produktet kan oppnå og om batteriet som følger med er stort nok til å vare så lenge som du trenger det. Om våre standard produkter ikke skulle være tilstrekkelig kan vi også i visse tilfeller spesialtilpasse varmehjelpemidler etter ditt behov.

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmoeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Varm og slitesterk vott med microfleece liner og syntetisk isolasjon (Fiberfill). Passer godt for dem med behov for ekstra varme. Lang mansjett med strikk rundt håndleddet og snølås. Geiteskinn i håndflaten gir godt grep og friksjon. CZone membranen stopper vind og vær, men tillater samtidig at fukt slippes ut. Varmeffekt er tilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.
Yttermateriale:	Polyester på håndbak og geiteskinn i håndflaten. Vindtett, vannavvisende og pustende CZone membran.
Detaljer:	Liten lomme med gummiert glidelås. Lang mansjett med strikk rundt håndleddet og snølås. Strammestopp rundt håndledd.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Meget god.
Egner seg for:	Utendørsaktivitet på kalde vinterdager.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
6	309267	1	Cy-V1/31861-6
7	309268	1	Cy-V1/31861-7
8	309269	1	Cy-V1/31861-8
9	309270	1	Cy-V1/31861-9
10	309271	1	Cy-V1/31861-10
11	309272	1	Cy-V1/31861-11

Cypromed Moon Light Mitt

Voksen

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Myk og varm vott med god bevegelsesfrihet og lammeskinn i håndflaten for godt grep. Strikk rundt håndleddet for god passform. Myk liner av børstet polyester. Isolert med Primaloft Gold syntetisk isolasjon. Varmeffekt er tilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.
Yttermateriale:	Polyamide på håndbaken beskytter mot vind. Impregnert lammeskinn i håndflaten gir gode grep.
Detaljer:	Strikk rundt håndleddet.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Meget god.
Egner seg for:	Utendørsaktivitet på kalde vinterdager.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
6	309273	1	Cy-V1/35121-6
7	309274	1	Cy-V1/35121-7
8	309275	1	Cy-V1/35121-8
9	309276	1	Cy-V1/35121-9
10	309277	1	Cy-V1/35121-10
11	309278	1	Cy-V1/35121-11

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	En moderne klassiker, med slitesterk og vindtett skallvott over en varm uttakbar fleeceliner med polyesterisolasjon (G-loft). Lineren med integrert varmetråd gjør at votten også kan kombineres med andre ytterhansker for å imøtekommе ulik temperatur, værholdhold og aktivitet.
Yttermateriale:	Slitesterkt og pustende tre-lags polyamide på håndbak og impregnert geiteskinn i håndflaten og på fingre.
Detaljer:	Lang mansjett. Stramming rundt håndledd med borrelås og snølås.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	God. Kan kombineres med flere isolerende lag dersom det skulle være behov.
Egner seg for:	Utendørsaktivitet på kjølige/kalte vinterdager.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
6	309279	2	Cy-V1/30571-6
7	309280	2	Cy-V1/30571-7
8	309281	2	Cy-V1/30571-8
9	309282	2	Cy-V1/30571-9
10	309283	2	Cy-V1/30571-10
11	309284	2	Cy-V1/30571-11
12	309285	2	Cy-V1/30571-12

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	En praktisk og allsidig vinterhanske med GORE-TEX membran. GORE-TEX membranen stopper vind og vær, og samtidig transporterer ut fukt. Syntetisk isolasjon (Fiberfill) sørger for å beholde varmen i hanskene. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	Slitesterkt og værbestandig polyamide stoff på håndbak, og forsterket håndflate og fingre med PU Grip syntetisk materiale for godt grep.
Detaljer:	Lang mansjett med snølås, og strikk rundt håndleddet. Forsterket håndflate med PU-belagt syntetisk stoff.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Meget god.
Egner seg for:	Utendørsaktivitet som krever bruk av fingre på kjølige/kalde vinterdager.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
6	309292	3	Cy-V2/3000700-6
7	309293	3	Cy-V2/3000700-7
8	309294	3	Cy-V2/3000700-8
9	309295	3	Cy-V2/3000700-9
10	309296	3	Cy-V2/3000700-10
11	309297	3	Cy-V2/3000700-11



Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmefekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	En praktisk og allsidig hanske med GORE-TEX membran. GORE-TEX membranen stopper vind og vær, og transporterer samtidig ut fukt. Tettsittende passform for godt grep og bruk av fingre. Varmetråd og varmefekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	Slitesterkt og pustende polyamid med TPU-membran, og forsterket håndflate og fingre.
Detaljer:	Formet mansjett som trekkes på. Justerbar håndleddsstropp.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	God.
Egner seg for:	Utendørsaktivitet på som krever finmotorikk på kjølige vinterdager



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
6	309286	3	Cy-V2/QAH-87-6
7	309287	3	Cy-V2/QAH-87-7
8	309288	3	Cy-V2/QAH-87-8
9	309289	3	Cy-V2/QAH-87-9
10	309290	3	Cy-V2/QAH-87-10
11	309291	3	Cy-V2/QAH-87-11

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmefekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Tettsittende skinnhanske for herre med ullfôr. Strikk i mansjett for god passform. Passer for aktiviteter som krever godt grep og finmotorikk. Varmetråd og varmefekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	Hjorteskinn.
Detaljer:	Strikk i mansjett beskytter mot kald luft og gir god passform.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Middels.
Egner seg for:	Aktiviteter i kjølig klima som krever godt grep og bruk av fingre.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
7	252703	4	Cy-V2/20220-7
8	252704	4	Cy-V2/20220-8
9	252705	4	Cy-V2/20220-9
10	252706	4	Cy-V2/20220-10
11	252707	4	Cy-V2/20220-11



Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmoeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	En eksklusiv skinnhanske laget i mykt og praktisk lammeskinn. En tidløs og stilig modell, med god passform. Fôret med merinoull 70 % og polyamide 30 %, og isolert med Swisswool som er et slitesterkt materiale som kombinerer ullfibre og maisstivelse for en myk og pustende opplevelse. Varmeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	Lammeskinn.
Detaljer:	Elastisk rundt håndleddet. Glidelåsdetalj.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	God.
Egner seg for:	Aktiviteter i kjølig klima som krever godt grep og bruk av fingre.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
6	309298	4	Cy/V2/30760-6
7	309299	4	Cy/V2/30760-7
8	309300	4	Cy/V2/30760-8
9	309301	4	Cy/V2/30760-9
10	309302	4	Cy/V2/30760-10
11	309303	4	Cy/V2/30760-11

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Tettsittende, håndsydd skinnhanske for dame med ullfør. Strikk i mansjett for god passform. Passer for aktiviteter som krever godt grep og finmotorikk. Varmeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	Hjorteskinn.
Detaljer:	Strikk i mansjett beskytter mot kald luft og gir god passform.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Middels.
Egner seg for:	Aktiviteter i kjølig klima som krever godt grep og bruk av fingre.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
6	252708	4	Cy-V2/10220-6
7	252709	4	Cy-V2/10220-7
8	252710	4	Cy-V2/10220-8

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Varm og komfortabel innerhanske med touchfunksjon på tommel -og pekefinger for å kunne benytte touchskjerm uten å måtte ta av hanskene. Primært ment for å brukes inni annen hanske/vott. Varmeråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	Ull, polyester og elastan.
Detaljer:	Touch-skjerm kompatible.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Lite, krever hanske eller vott utenpå i kalde klima.
Egner seg for:	Bruk inni annen hanske, vott eller gummihanske i vått og/eller kjølig klima.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
6	252711	5	Cy-V2/34370-6
7	252712	5	Cy-V2/34370-7
8	252713	5	Cy-V2/34370-8
9	252714	5	Cy-V2/34370-9
10	252715	5	Cy-V2/34370-10
11	252716	5	Cy-V2/34370-11

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	En tetsittende og raskt tørkende hanske i Polartec Power Stretch Pro materiale fra Rab, men touchfunksjon på pekefinger, langfinger og tommel. En hanske med stor bevegelsesfrihet. Primært ment for å brukes inni annen hanske/vott. Varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	Polartec Power Stretch Pro material, et pustende og lett beskyttende materiale i stretch fleece som tørker raskt.
Detaljer:	Touch-skjerm kompatibel.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Lite, krever hanske eller vott utenpå i kalde klima.
Egner seg for:	Bruk som lag under ytterhanske, vott eller gummihanske til aktiviteter som krever bruk av fingrene i et vått og/eller kjølig klima.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
6	309304	5	Cy-V2/QAH-55-6
7	309305	5	Cy-V2/QAH-55-7
8	309306	5	Cy-V2/QAH-55-8
9	309307	5	Cy-V2/QAH-55-9
10	309308	5	Cy-V2/QAH-55-10
11	309309	5	Cy-V2/QAH-55-11

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Fleksibel arbeidshanske med varmt fleece fôr som gir god varmeisolasjon. Passer til monteringsarbeid og annet arbeid i kaldt miljø. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	Neoprene på handbak og MicroSkin Shield i håndflaten for godt grep både på tørre og fuktige overflater, og god beskyttelse.
Detaljer:	Forsterket håndflate og fingre. Integrert vannavvisende og pustende ProTex membran. Refleksdetaljer.
Farge:	Svart med neon detaljer.
Isolasjonsevne:	Meget god.
Egner seg for:	Arbeid i kuldelager eller utendørs vinterstid som krever god bevegelighet og godt grep.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
8	309322	9	Cy-V2/107.8112-8
9	309323	9	Cy-V2/107.8112-9
10	309324	9	Cy-V2/107.8112-10
11	309325	9	Cy-V2/107.8112-11
12	309326	9	Cy-V2/107.8112-12

Cypromed Joystick Moon Light Mitt

Voksen

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Myk og varm vott med god bevegelsesfrihet og lammeskinn i håndflaten for godt grep. Strikk rundt håndleddet for god passform. Myk liner av børstet polyester. Isolert med Primaloft Gold syntetisk isolasjon. Åpning for joystick i håndflaten, som gjør bruk av elektrisk rullestol enklere, selv på kalde dager. Skinnklaff lukkes over åpningen når hanskene ikke brukes til joystick.
Yttermateriale:	Polyamide på håndbaken beskytter mot vind. Impregnert lammeskinn i håndflaten gir gode grep.
Detaljer:	Strikk rundt håndleddet for god passform.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Meget god.
Egner seg for:	Kjøring av el-rollestol på kjølige og kalde vinterdager.
Notat:	Se HMS-nr for vott uten spritt på neste side.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.: (høyre)	HMS-Art.Nr.: (venstre)	Post:	Cypromed Art.Nr.: (høyre)	Cypromed Art.Nr.: (venstre)
5	309327	309328	10	Cy-B1-35121SH-5	Cy-B1-35121SV-5
6	309329	309330	10	Cy-V1/35121SH-6	Cy-V1/35121SV-6
7	309331	309332	10	Cy-V1/35121SH-7	Cy-V1/35121SV-7
8	309333	309334	10	Cy-V1/35121SH-8	Cy-V1/35121SV-8
9	309335	309336	10	Cy-V1/35121SH-9	Cy-V1/35121SV-9
10	309337	309338	10	Cy-V1/35121SH-10	Cy-V1/35121SV-10
11	309339	309340	10	Cy-V1/35121SH-11	Cy-V1/35121SV-11

Cypromed Joystick Moon Light Mitt u/splitt

Voksen

Størrelse:	HMS-Art.Nr.: (høyre)	HMS-Art.Nr.: (venstre)	Post:	Cypromed Art.Nr.: (høyre)	Cypromed Art.Nr.: (venstre)
5	309363	309364	10	Cy-B1/35121-5H	Cy-B1/35121-5V
6	309365	309366	10	Cy-B1/35121-6H	Cy-B1/35121-6V
7	309367	309368	10	Cy-B1/35121-7H	Cy-B1/35121-7V
8	309369	309370	10	Cy-B1/35121-8H	Cy-B1/35121-8V
9	309371	309372	10	Cy-B1/35121-9H	Cy-B1/35121-9V
10	309373	309374	10	Cy-B1/35121-10H	Cy-B1/35121-10V
11	309375	309376	10	Cy-B1/35121-11H	Cy-B1/35121-11V



Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Medium tykk helårs merinoullsokk. Slitesterk og god passform med frottering i såle som gir ekstra varme og komfort. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.
Materiale:	Merinoull 60 %, nylon 38 % og 2 % elastan (lycra).
Detaljer:	Leveres med mansjett til legg for oppbevaring av batteri.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy i kalde klima.
Egner seg for:	Bruk i sko, støvler eller annet fottøy.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
34/36	252754	11	Cy-V4/U75111-34/36
37/39	252755	11	Cy-V4/U75111-37/39
40/42	252756	11	Cy-V4/U75111-40/42
43/45	252757	11	Cy-V4/U75111-43/45
46/48	252758	11	Cy-V4/U75111-46/48

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Tykk sokk i ullfrotté som sitter godt på foten uten å stramme. Ullfrottéstrikkingens høye luftinnhold gir godt isolasjon. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.
Materiale:	Merinoull 60 % og polyamid 40 %.
Detaljer:	Leveres med mansjett til legg for oppbevaring av batteri.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy i kalde klima.
Egner seg for:	Bruk i sko, støvler eller annet fottøy.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
36/39	252751	11	Cy-V4/TRIC-36/39
40/44	252752	11	Cy-V4/TRIC-40/44
45/48	252753	11	Cy-V4/TRIC-45/48

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Medium tykk helårs merinoullsokk. Strømpe som er ekstra tykk rundt tærne og foran på leggen. I tillegg har den paneler med lav friksjon som gjør det enklere å komme ned i støvlene. God demping. FusionTech-teknologi, der ulltråder spinnes sammen med syntetiske materialer, som gir komfort, sørger for fukttransport og gir enestående slitestyrke. Varmetråd og varmoeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.
Materiale:	Merinoull 34%, polypropylen 33 %, polyamid 32 % og elastan 1%.
Detaljer:	Batterilomme er integrert i produktet.
Farge:	Svart/grå.
Isolasjonsevne:	Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy i kalde klima.
Egner seg for:	Bruk i sko, støvler eller annet fottøy.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
36/39	309353	13	Cy-V3/B710545i-36/39
40/43	309354	13	Cy-V3/B710545i-40/43
44/47	309355	13	Cy-V3/B710545i-44/47
48	309356	13	Cy-V3/B710545i-48

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Varmesåler for bruk i fottøy. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.
Materiale:	EVA og fleece.
Detaljer:	Leveres med mansjett til legg for oppbevaring av batteri.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy i kalde klima.
Egner seg for:	Bruk i sko, støvler eller annet fottøy.




Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
36/37	252765	14	Cy-V5-/Sole-36/37
38/39	252766	14	Cy-V5-/Sole-38/39
40/41	252767	14	Cy-V5-/Sole-40/41
42/43	252768	14	Cy-V5-/Sole-42/43
44/45	252769	14	Cy-V5-/Sole-44/45
46/47	252770	14	Cy-V5-/Sole-46/47

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	5200mAh eller 18.9 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Varm og myk termosokk som oppleves som en sovepose for føttene. Overdel i vannavstøtende nylon og såle med antisli. Varmeråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.
Materiale:	Polyester og nylon.
Detaljer:	Ankelstropp og sklisikker såle. Snøring rundt legg.
Farge:	Svart.
Isolasjonsevne:	Meget god.
Egner seg for:	Bruk innendørs. Ikke beregnet for utendørsbruk som sko, da produktet ikke har fast såle.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
37/38	252771	15	Cy-V4/termo-37/38
39/41	252772	15	Cy-V4/termo-39/41
42/43	252773	15	Cy-V4/termo-42/43
44/46	252774	15	Cy-V4/termo-44/46
47/49	252775	15	Cy-V4/termo-47/49

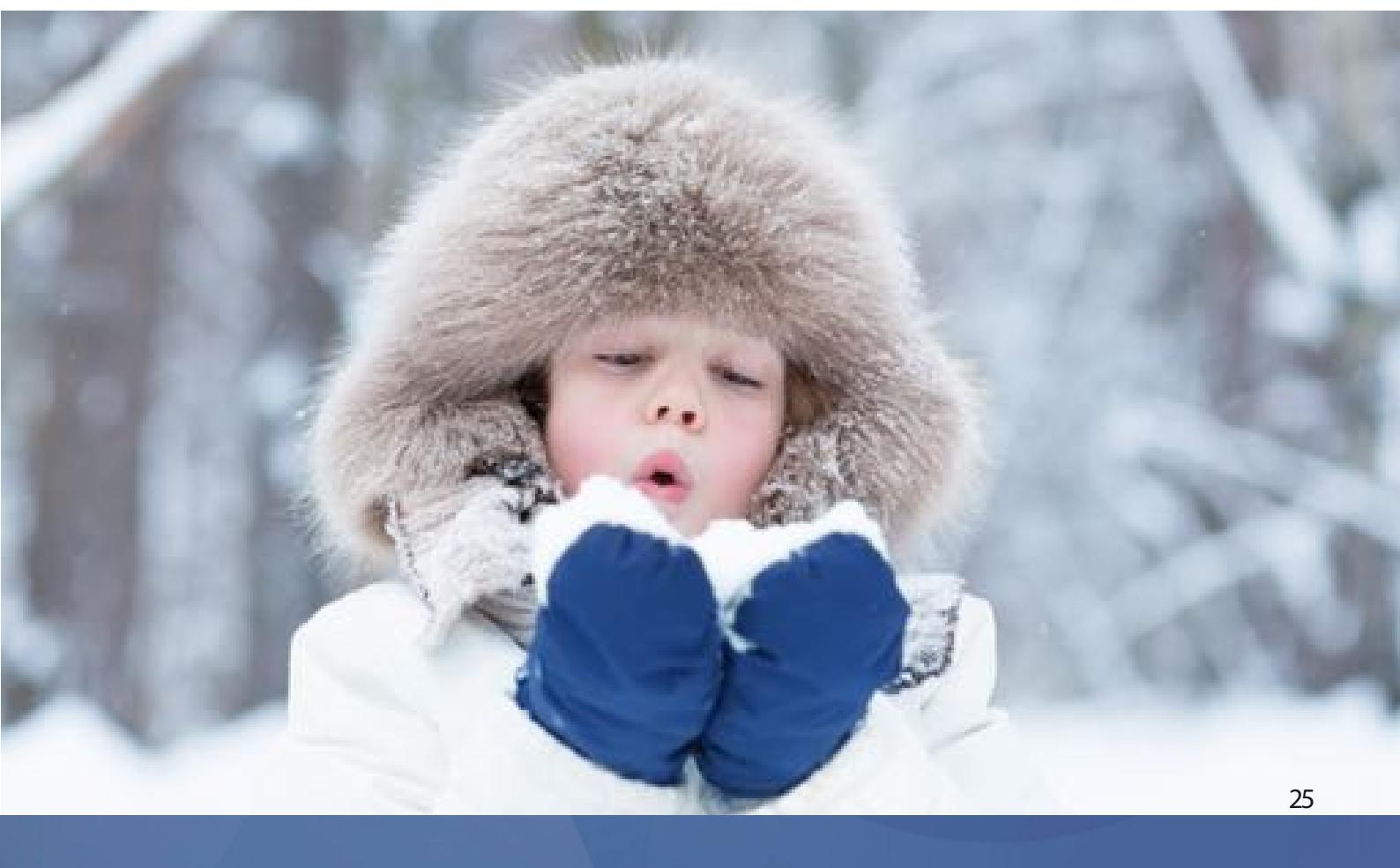

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmefekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Slitesterk, myk og dunaktig vott for de minste som er enkel å få av og på med glidelås i siden. Lang mansjett som sitter godt over jakke/dress. Borrelås rundt håndledd gir god passform. Varmeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	HESTRA Micron polyester. Vindtett, vann-avvisende og pustende. Forsterket håndflate og fingertupper.
Detaljer:	Strammestropp med borrelås, glidelåslukking i siden.
Farge:	Svart som standard. Fargene rosa, blå og mønstrete kan leveres på etterspørrelse ved tilgjengelighet.
Isolasjonsevne:	Meget god.
Egner seg for:	Barn i ulike aktiviteter i kjølig eller kaldt klima.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
1	252723	6	Cy-B1/36421-1
2	252724	6	Cy-B1/36421-2
3	252725	6	Cy-B1/36421-3
4	309310	6	Cy-B1/36421-4
5	309311	6	Cy-B1/36421-5

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Slitesterk, myk og varme tommelvotter til barn. Enkel å ta av og på med glidelås på siden. Vottene er vind og vannavvisende, slik at barnet holder seg varm og tørr selv på fuktige dager. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	HESTRA Micron polyester. Vindtett, vann-avvisende og pustende. Forsterket håndflate med PU-stoff.
Detaljer:	Glidelås i siden.
Farge:	Svart/grå som standard. Blå/orange (bilde), navy/rød, rosa/fuchsia, leveres på etterspørrelse ved tilgjengelighet.
Isolasjonsevne:	Meget god.
Egner seg for:	Barn i ulike aktiviteter i kjølig eller kaldt klima.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
3	309312	7	Cy-B1/32221-3
4	309313	7	Cy-B1/32221-4
5	309314	7	Cy-B1/32221-5
6	309315	7	Cy-B1/32221-6
7	309316	7	Cy-B1/32221-7

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmefekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Slitesterk, myk og varm hanske til barn. Enkel å ta av og på med glidelås på siden. Hansene er vind og vannavvisende, slik at barnet holder seg varm og tørr selv på fuktige dager. Lang mansjett gir god passform. Varmeråd og varmefekt er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Yttermateriale:	HESTRA Micron polyester. Vindtett, vann-avvisende og pustende. Forsterket håndflate.
Detaljer:	Glidelås i siden.
Farge:	Svart/grå som standard. Blå/orange (bilde), navy/rød, rosa/fuchsia, leveres på etterspørsel ved tilgjengelighet.
Isolasjonsevne:	Meget god.
Egner seg for:	Barn i ulike aktiviteter i kjølig eller kaldt klima.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
3	309317	8	Cy-B2/32220-3
4	309318	8	Cy-B2/32220-4
5	309319	8	Cy-B2/32220-5
6	309320	8	Cy-B2/32220-6
7	309321	8	Cy-B2/32220-7

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Klassiske, ribbstrikkete ullsokker som sitter på føttene uten å stramme. Merinoullen føles myk og behagelig mot huden og puster godt. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.
Materiale:	Merinoull 65 %, Polyamid 33 % og 2 % Lycra.
Farge:	Grå.
Isolasjonsevne:	Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy i kalde klima.
Egner seg for:	Bruk i sko, støvler og annet fottøy.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
19/22	309345	12	Cy-B4/0673-19/22
23/26	309346	12	Cy-B4/0673-23/26
27/30	309347	12	Cy-B4/0673-27/30
31/35	309348	12	Cy-B4/0673-31/35

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	Medium tykk helårs merino ullsokk. Slitesterk og god passform med frottering i såle som gir ekstra varme og komfort. Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal varme for hver enkelt størrelse.
Materiale:	Merinoull 58 %, Nylon 38 % og 4 % Lycra.
Farge:	Rosa. Blå.
Isolasjonsevne:	Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy i kalde klima.
Egner seg for:	Bruk i sko, støvler og annet fottøy.



Størrelse:	Farge	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
19/21	Blå	309341	12	Cy-B4/U75113-BLUE-19/21
22/24	Blå	309343	12	Cy-B4/U75113-BLUE-22/24
19/21	Rosa	309342	12	Cy-B4/U75113-BLUE-22/24
22/24	Rosa	309344	12	Cy-B4/U75113-PINK-22/24

Spesifikasjoner

Risikoklasse:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.
Varmeffekt:	Over 7W, avhengig av størrelse.
Termostat:	3-trinns regulerbar termostat. Termostaten vil alltid forsøke å holde varmetråden i produktet på 33°C, 35°C eller 42°C, avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Batterivakt:	Lysindikator melder fra når batteriet må lades eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Brukstid:	Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4 timer, avhengig av størrelse og omgivelsestemperatur.
Batteri:	2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).
Beskrivelse:	En tykk, helfrottet og ekstra varm merinoullstrømpe til hverdag og tur. Den lange mansjetten sikrer god passform og varme også opp over leggen. Høypartiet har ekstra forsterkning mot slitasje. Ekstra mesh over vristen øker fukttransporten betydelig. Ull blandet med tekniske fibre for økt slitestyrke og passform.
Materiale:	Merinoull 62 %, Nylon 34 % og 4 % Lycra.
Detaljer:	Batterilomme integrert i produktet.
Farge:	Grå/blå som standard.
Isolasjonsevne:	Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy i kalde klima.
Egner seg for:	Bruk i sko, støvler og annet fottøy.



Størrelse:	HMS-Art.Nr.:	Post:	Cypromed Art.Nr.:
25/27	309349	13	Cy-B3/U75142-25/27
28/30	309350	13	Cy-B3/U75142-28/30
31/33	309351	13	Cy-B3/U75142-31/33
34/36	309352	13	Cy-B3/U75142-34/36

Tilbehør/reservedeler

Tilbehør/reservedeler

Beskrivelse	HMS-Art.Nr.:	Passer best til	Cypromed Art.Nr.:
Individuell tilpasning	309377	Alle produkter som kan spesialtilpasses etter instruksjon fra klinisk personell	
Batteri, stort, 5200 mAh / 18.9 Wh 10 cm kabellengde (hansker)	252778	Varmehjelpe midler til voksne	1S1751AB-32/100
Batteri, stort, 5200 mAh / 18.9 Wh 32 cm kabellengde (sokker o.l.)	252779	Varmehjelpe midler til voksne som trenger lang kabel	1S1751AB-32/320
Batteri, lite, 2200 mAh / 8.14 Wh 10 cm kabellengde (hansker)	252776	Varmehjelpe midler til barn	1IMP133450/100
Batteri, lite, 2200 mAh / 8.14 Wh 20 cm kabellengde (sokker o.l.)	252777	Varmehjelpe midler til barn som trenger lang kabel	1IMP133450/200
2-kanals batterilader	239891	3.7 V batterier til varmehjelpe midler	Cy-GT2K
Batteriholder leggfeste for voksne	175253	Såler/Sokker til voksne	Cy-BHV-Legg
Batteriholder leggfeste for barn	175252	Sokker til barn	Cy-BHB-Legg




Bestillingsskjema varmehjelpe midler

ORDRENUMMER:			
KONTAKTINFORMASJON FRA BESTILLER			
Bestiller ref:	Dato:	Antall sider	
Telefon:	ANNEN INFORMASJON AV BETYDNING: <i>(benytt eget ark ved behov)</i>		
E-post:			
<input type="checkbox"/> Individuell tilpasning er ønsket <i>(Benytt ev. eget skjema fra Cypromed for dette)</i>			
ARTIKKELNUMMER	ANTALL	TYPE HJELPEMIDDEL	
Størrelse finner du ved å benytte skjemaene på side 2.			

BATTERIPLASSERING			
<input type="checkbox"/> På produktet Standard på håndbekledning	<input type="checkbox"/> Underarm/legg Standard på fotbekledning	<input type="checkbox"/> Overarm/lår Individuell tilpasning	<input type="checkbox"/> Beltefeste Individuell tilpasning
Ved ønske om standardløsning trenger du ikke å krysse av.			

	EKSTRA BATTERIER UTOVER STANDARD			
	Batteri, Stor/Lang 1S1751AB-32/320F Stort batteri med Lang ledning (Hansker/Votter, Voksen)	Batteri, Stor/Kort 1S1751AB-32/100F Stort batteri med Kort ledning (Såler/Sokker, Voksen)	Batteri, Lite/Kort 1IMP133450/100F Lite batteri med Kort ledning (Hansker/Votter, Barn)	Batteri, Lite/Lang 1IMP133450/200F Lite batteri med Lang Ledning (Såler/Sokker, Barn)
	Batterilader 2-kanals CY-GT2K, for alle batterier 3.7V		Annet:	
Merk antall i ruten til venstre.				

Merk: Skjemaet skal ikke inneholde person -og helseopplysninger ut over det som er nødvendig for at Cypromed skal kunne utføre individuelle tilpasninger og utsending av varer direkte til bruker der dette er avtalt. Skjema sendes til Cypromed på e-post: service@cypromed.no, med bestilling eller med referanse til bestilling. For nærmere informasjon om hvordan Cypromed mottar og behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring på www.cypromed.no.

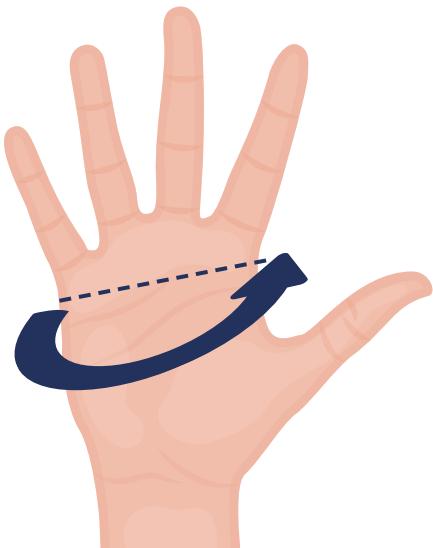

Mål håndens omkrets rundt hånden (MCP).
MCP-målet (\varnothing) i cm angir størrelsen i tabellen.


Størrelse Dame	
Størrelse	\varnothing (cm)
6	15
7	18
8	20
9	22

Størrelse Herre	
Størrelse	\varnothing (cm)
7	18
8	20
9	23
10	25
11	30

Hansker og votter

Størrelse Barn/Jr.			
Baby/barn	Junior		
Str.	År	Str.	År
1	1-2	3	4-5
2	2-3	4	6-7
3	3-4	5	8-9
4	4-5	6	10-11
5	5-6	7	12-13
6	6-7		

Dersom mål er mellom to størrelser, anbefaler vi å velge det største alternativet.

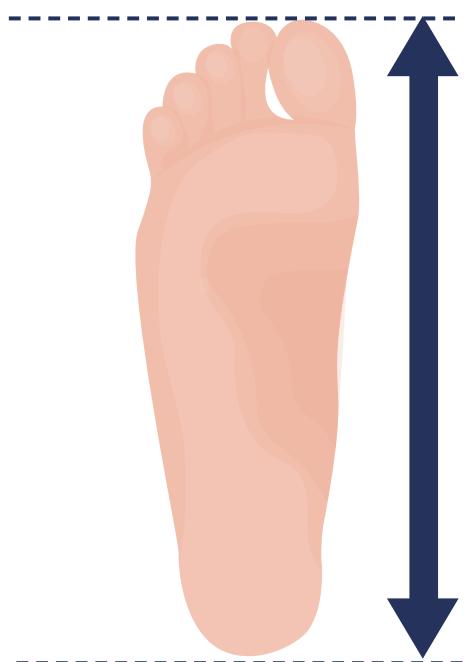

Sokker og såler

Lengde	Størrelse (EU)*
13.0-13.5	20-21
14.0-14.5	22-23
14.5-15.0	24-25
15.5-16.5	26-27
17.0-18.0	28-29
18.5-19.5	30-31
20.0-21.0	32-33
21.5-22.0	34-35
22.5-23.0	36-37
23.2-24.2	38-39
24.7-25.4	40-41
26.0-27.0	42-43
27.0-27.9	44-45
27.9-28.6	46-47

Dersom mål er mellom to størrelser, kan det lønne seg å velge det største alternativet.

*Tilsvarer EU-skostørrelse: Størrelser på sokker og såler tilsvarer normalt din skostørrelse.

Merk: Skjemaet skal ikke inneholde person- og helseopplysninger ut over det som er nødvendig for at Cypromed skal kunne utføre individuelle tilpasninger og utsending av varer direkte til bruker der dette er avtalt. Skjema sendes til Cypromed på e-post: service@cypromed.no, med bestilling eller med referanse til bestilling. For nærmere informasjon om hvordan Cypromed mottar og behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring på www.cypromed.no.

Cypromed kan levere spesialtilpassede produkter som kan være nødvendig ved for eksempel amputasjoner og lignende. Vi kan også tilpasse varme i andre produkter hvor det er behov for varme.

Ta kontakt for nærmere informasjon om spesialtilpassede produkter. Merk at alle søknader om spesialtilpassede produkter må komme fra kvalifisert klinisk personell hvor de må beskrive det spesialtilpassede produktets formål og virkemåte.

Send oss gjerne en e-post til service@cypromed.no, eller ring oss om det skulle være noe du vil vite mer om!

Se eget skjema for dette på kommende sider.

Skjema for spesialtilpasninger (del 1/2)

Informasjon



Individuelt tilpasset utstyr

ORDRENUMMER: **AKRONYM/TALLKODE BRUKER:**

INDIVIDUELL TILPASNING BESTILLER	
Bestiller ref:	
Telfon:	
E-post:	
<input type="checkbox"/> Individuell tilpasning er påkrevd	

INDIVIDUELT TILPASSET UTSTYR - PRODUKTETS SÆRLIGE EGENSKAPER, BESKRIVELSE:		
<input type="checkbox"/> Høyre hånd	<input type="checkbox"/> Venstre hånd	<input type="checkbox"/> En fot (såle/sokk)



TILVIRKER AV INDIVIDUELT TILPASSET UTSTYR:

CYPROMED AS
VIKAVEGEN 17
2312 OTTESTAD
+47 62 57 44 33
SERVICE@CYPROMED.NO

For individuelt tilpasset utstyr vil Cypromed utarbeide en erklæring etter 2017-745-MDR - forordning om medisinsk utstyr. Erklæringen vil ligge ved utstyret ved levering, og vil inneholde følgende informasjon:

- informasjon om produsent og alle produksjonssteder
 - data som gjør det mulig å identifisere det aktuelle utstyret,
 - informasjon om at utstyret bare er beregnet på én bestemt pasient/bruker som identifiseres ved navn, akronym eller tallkode,
 - navnet på personen som har forskrevet utstyret og evt aktuell helseinstitusjon
 - produktets særlige egenskaper som angitt i forskrivningen,
 - erklæring om at utstyret oppfyller de generelle krav til sikkerhet og ytelse fastsatt i vedlegg I, og evt hvilke krav som ikke er oppfylt og årsakene til dette.

Merk: Skjemaet skal ikke inneholde person -og helseopplysninger ut over det som er nødvendig for at Cypromed skal kunne utføre individuelle tilpasninger og utsending av varer direkte til bruker der dette er avtalt. Skjema sendes til Cypromed på e-post: service@cypromed.no, med bestilling eller med referanse til bestilling. For nærmere informasjon om hvordan Cypromed mottar og behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring på www.cypromed.no.



Individuelt tilpasset utstyr


ORDRENUMMER:

AKRONYM/TALLKODE BRUKER:

INDIVIDUELT TILPASSET UTSTYR - PRODUKTET BESKRIVELSE / ILLUSTRASJON:

Eksempel: Omriss av hånd/illustrasjon av hånd, med mål (cm) for hver finger det ønskes spesialtilpasning på.
Obs! Mål tas fra mellom fingre til fingertupp.

- Evt. oppgi finger og eksakt mål:
- Hø. pekefinger: 3 cm
 - Hø. langfinger: 4 cm

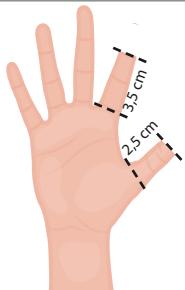

Merk: Skjemaet skal ikke inneholde person -og helseopplysninger ut over det som er nødvendig for at Cypromed skal kunne utføre individuelle tilpasninger og utsending av varer direkte til bruker der dette er avtalt. Skjema sendes til Cypromed på e-post: service@cypromed.no, med bestilling eller med referanse til bestilling. For nærmere informasjon om hvordan Cypromed mottar og behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring på www.cypromed.no.

Kontakt:

www.cypromed.no

Postadresse: Vikavegen 17, 2312 Ottestad

Telefon: 62 57 44 33

Epost: service@cypromed.no

